

BARRES D'APPUI



LES FONCTIONS

Les barres d'appui sont une solution indispensable afin de prévenir la perte d'autonomie, favoriser l'autonomie et sécuriser l'habitant dans le logement.

Cependant, il est important de définir les besoins de l'utilisateur afin de répondre de façon adaptée à la solution à mettre en œuvre dans le logement.

Se relever / s'asseoir

La barre d'appui doit permettre à l'utilisateur de passer d'une position assise à une position debout.

Se sécuriser

La barre d'appui doit permettre à l'utilisateur de maintenir une position assise ou debout, de franchir un obstacle.

Se transférer

La barre d'appui doit permettre à l'utilisateur de passer d'une position assise à une autre, sans passer par la position debout.

LES TYPES DE BARRES D'APPUI

Les barres d'appui droites.




Les barres d'appui droites sont souvent les plus économiques et sont utilisées en 1er choix pour les utilisateurs.

Bien souvent positionnées pour un seul usager, ce type de barre répond à un besoin unique et personnalisé

⚠ Attention

Une barre d'appui mal positionnée peut s'avérer inefficace voire dangereuse pour l'utilisateur.

Les barres d'appui relevables.

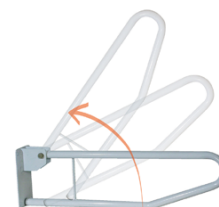

Les barres d'appui relevables sont majoritairement utilisées afin de ne pas entraver l'accès aux équipements, WC et siège de douche.

⚠ Attention


Une barre d'appui relevable qui serait installée pour réaliser un transfert peut s'avérer dangereuse à l'utilisation si les fixations et le support de fixation ne sont pas adaptés.

Les barres d'appui coudées.

Les barres d'appui coudées sont de plus en plus nombreuses sur le marché, puisqu'elles permettent de répondre à un plus grand nombre d'utilisateurs et de **fonctions**.

À titre d'exemple, nous pouvons citer :

- les barres d'appui coudées à 90°
- les barres d'appui coudées à 135°
- les barres d'appui d'angle

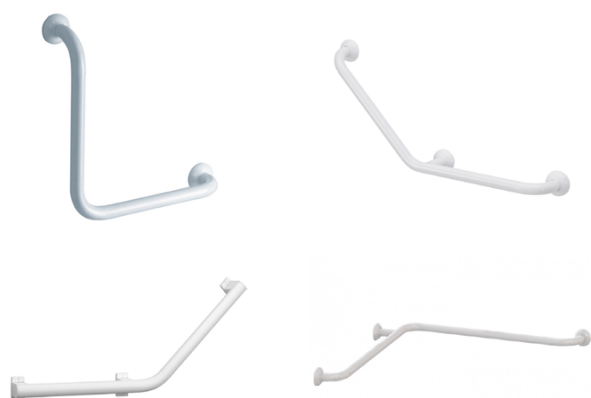

Remarque

Certains fabricants permettent la composition de barres d'appui reliant mur à mur avec ou sans angle, de longueur et d'angulation différente.

Les barres d'appui multi-fonctions.

De nombreuses barres de la gamme sanitaire sont proposées actuellement par les fabricants.

Certaines d'entre elles associent des fonctions complémentaires principalement dans l'objectif de démocratisation et d'acceptation de ces solutions. Les barres d'appui sont encore trop souvent associées à une connotation négative et donc stigmatisante des personnes en situation de handicap et/ou en perte d'autonomie.

À titre d'exemple, nous pouvons citer :

- les barres d'appui multifonctions pour WC intégrant patère, porte-rouleau, porte balayette...
- les barres d'appui multifonctions pour la douche intégrant support douchette, tablette...

LES CONSEILS

Les matériaux.

De nombreux matériaux sont disponibles dans le marché, les gammes inox présentent de nombreux avantages dans les collectivités en raison de sa facilité d'entretien (avec des produits ménagers d'usage professionnel) et de sa résistance à la corrosion.

Nous déconseillons les matériaux chromés, notamment pour les pièces d'eau en raison d'une moins bonne adhérence et d'un contact plus froid que d'autres matériaux, ainsi que par l'absence de choix en vue de créer un contraste (il s'agit d'une solution plus adaptée pour les personnes présentant un **handicap visuel** et/ou un **handicap non visible**).

La fixation.

Nous conseillons de privilégier les barres d'appui avec 3 points de fixation, ainsi qu'une platine de fixation au plus proche du support et couverte par une rosace.



Attention

nous déconseillons l'installation de barres d'appui à ventouses en raison d'une adhérence fluctuante selon les supports, l'usage et le temps.



Rappel

Le choix de la visserie et des chevilles est de la responsabilité de l'artisan.

QUELQUES EXEMPLES ET RÉFÉRENCES

À titre indicatif et non exhaustif, nous avons fait le choix de vous illustrer quelques références de barres d'appui ci-dessous (ces exemples seront susceptibles d'évoluer) :

FABRICANT	PELLET ASC pellet-asc.fr	NORMBAU normbau.fr	DELABIE delabie.fr
GAMME	Arsis – barres, sièges	Cavere Care – barres, sièges, accessoires	Be-Line – barres, sièges, accessoires
AVANTAGES	Gamme évolutive, 3 coloris	Gamme évolutive, Accessoires sanitaires, 5 coloris	
INCONVÉNIENTS			Diamètre de la barre supérieur aux 2 autres gammes mentionnées, 2 coloris
PRIX	€€	€€€	€€



POUR ALLER PLUS LOIN :
WWW.GUIDE-LOGEMENTS-ACCESSIBLES.FR



EN PARTENARIAT AVEC



Dans l'optique de la construction pour tous, ce guide, à destination des organismes Hlm, s'attache à proposer des aménagements et des conseils qui ne stigmatisent pas le logement. Il propose également des solutions conceptuelles pour offrir un logement que le locataire pourra facilement adapter avec ses propres produits d'assistance. Ce guide ne se substitue pas à la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre dans le choix de la conception des logements et des solutions techniques retenues.